



# PUHLA.

# Pelastuslakana

## käyttöohje

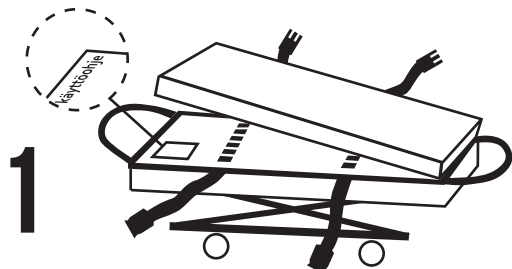

**Pelastuslakana sijoitetaan** patjan alle käyttöohje ylöspäin. Remmit jäävät lakanan alapuolelle. Säädä remmit etukäteen sopivan mittaisiksi.

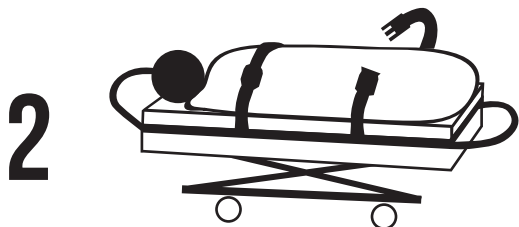

**Vaaran uhatessa** vedä remmit potilaan ympärille, kiinnitä lukot ja kiristä nauhat.



Vedä potilaan ylävartalo sängyn reunan yli. Kannattele ylävartaloa niin pitkälle, että lantio on sängyn reunan ulkopuolella.



Vedä potilas turvaan.



Max. 150 kg

