

PUHLA.

Pelastuslakana

Räddningslakan

Käyttöohje - Bruksanvisning



1

Pelastuslakana sijoitetaan

patjan alle käyttöohje ylöspäin. Remmit jäävät lakanan alapuolelle. Sääda remmit etukäteen sopivan mittaisiksi.

Räddningslakanet placeras

under madrassen bruksanvisningen uppåt. Banden blir under lakanet. Justera banden i förväg.



2

Vaaran uhatessa

vedä remmit potilaan ympärille, kiinnitä lukot ja kiristä nauhat.

Vid fara fixera patienten med banden.



3


Vedä potilaan ylävartalo sängyn reunan yli. Kannattele ylävartaloa niin pitkälle, että lantio on sängyn reunan ulkopuolella.

Dra patientens överkropp över sängkanten. Bär överkroppen tills bäckenet blir över sängkanten.

4

Vedä potilas turvaan.

Skydda patienten.

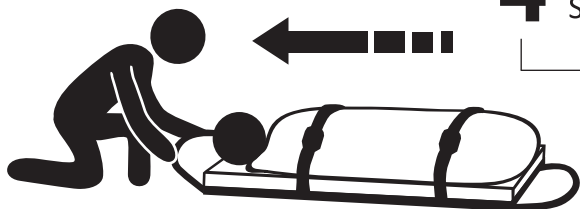

Max. 150 kg

www.puhla.fi



75 % puuvilla / bomull
24 % polyesteri / polyester
1 % antistaattinen materiaali / antistatisk material

